

TEST RÁPIDOS COVID-19 EN FORMATO INDIVIDUAL

KIT DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS IgM/IgG

Inmunocromatografía de oro coloidal

MÁXIMA FIABILIDAD CONTRASTADA

Sensibilidad: **98,67%** Especificidad: **91,11%**



- **Muy fácil de usar**, con solo una gota de sangre obtenida mediante una punción en el dedo
- Resultados en **10-15 minutos**
- **Económico** y accesible para todos los públicos
- Se puede realizar **en cualquier lugar**
- Envase **individual**

Contiene:

- Toallita desinfectante
- Lanceta para punción en el dedo
- Casete de prueba
- Diluyente
- Pipeta

PROCEDIMIENTO


Paso 1

Desinfecte la punta del dedo con una toallita con alcohol.




Paso 4

Añada la muestra de sangre en el pocillo A.

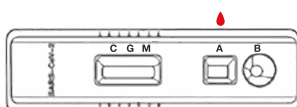


Paso 2

Use una lanceta estéril para obtener sangre del dedo.

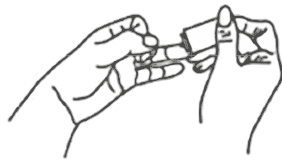


Paso 5

Añada dos gotas de diluyente en el pocillo B.

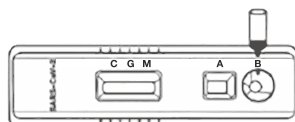


Paso 3

Recoja la muestra de sangre con la pipeta.

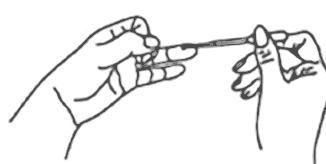


Paso 6

Espere 15 minutos para leer el resultado.

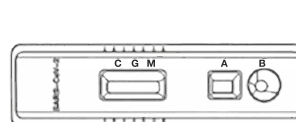


RESULTADOS


Negativo

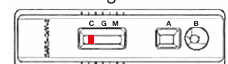


Positivo

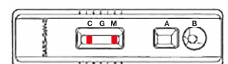

Positivo

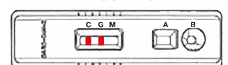

Positivo

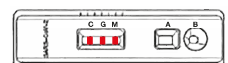

C: Línea de control de calidad
G: Línea de detección de IgG
M: Línea de detección de IgM

INVÁLIDO Si la línea de control de calidad (C) no aparece marcada, la prueba no es válida.