

ESTILA® FORTE *Toallitas*

Toallitas oftálmicas unidosis para la higiene periorcular en niños y adultos, combinadas con una almohadilla calentable.

Indicaciones:

ESTILA FORTE es una toallita de algodón natural de un solo uso, impregnada de una solución que contiene Hy-Ter® (hialuronato sódico y extracto del árbol del té) y Aloe Vera, que ejerce una acción limpiadora, suavizante, calmante y descongestiva.

ESTILA FORTE ha sido formulado utilizando antiinflamatorios y antisépticos naturales para obtener un alivio rápido de los síntomas.

Una correcta higiene palpebral es crucial en caso de situaciones potenciales o continuas de inflamación o infección ocular y periorcular:

Gracias a la formulación con Hy-Ter®, **ESTILA FORTE** está especialmente indicado para la higiene de los párpados y las pestañas y como adyuvante:

- antiséptico para cirugía previa y postoperatoria.
- en el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana y alérgica.
- en blefarokonjuntivitis.
- en la blefaritis posterior; cuando las glándulas de Meibomio están ocluidas.

Las glándulas de Meibomio se encuentran dentro de los párpados y segregan una capa lipídica que ayuda a evitar que la película lagrimal se evapore. El tratamiento con la almohadilla en combinación con un masaje de párpados, permite la apertura y limpieza de estas glándulas con el fin de reanudar la producción natural de los lípidos necesarios para una película lagrimal sana.

Ingredientes:

Agua, PEG / PPG - 20/15 dimeticona, extracto de aloe barbadensis, Hy-Ter® (hialuronato sódico, 4-terpineol), glizirizato de amonio, caprilil/capril glucósido, sal sódica de ácidos grasos del aceite de coco condensados con aminoácidos de trigo, etilhexilglicerina, fenetil alcohol, cloruro de sodio, fosfato de sodio, fosfato de disodio, PPG-26 Buteth-26, aceite de ricino hidrogenado PEG-40.

Presentación:

28 toallitas unidosis + 1 almohadilla calentable.


Uso y administración:

Limpieza palpebral sin calor asociado:



1. Lavar bien las manos con jabón y aclarar abundantemente con agua.
2. Abrir el sobre rasgando por la muesca pre-cortada y extraer la toallita impregnada.
3. Desplegar la toallita y limpiar cuidadosamente los párpados y las pestañas desde la esquina interna del ojo a la externa, manteniendo el ojo cerrado. Repetir la operación durante 1-2 minutos desde la esquina interna del ojo a la externa hasta la eliminación completa de la secreción del párpado y cualquier depósito posible.

Limpieza palpebral con calor asociado:

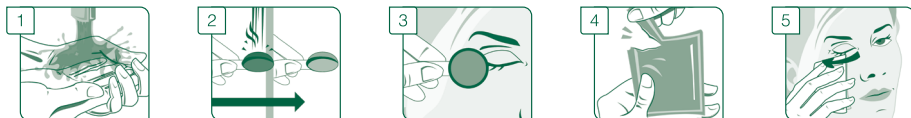

1. Lavar bien las manos con jabón y aclarar abundantemente con agua.
2. Calentar la almohadilla hasta que el color cambie de naranja a amarillo. El cambio de color significa que la almohadilla ha alcanzado la temperatura ideal para el masaje del párpado.
3. Sostener la almohadilla caliente por la solapa, masajear el párpado durante 3-5 minutos ejerciendo una ligera presión.
4. Inmediatamente después de la aplicación de la almohadilla ocular; abrir un sobre rasgando por la muesca pre-cortada y extraer la toallita.
5. Desplegar la toallita y limpiar cuidadosamente los párpados y las pestañas desde la esquina interna del ojo a la externa, manteniendo el ojo cerrado.

Cómo calentar la almohadilla ocular:

La almohadilla para los ojos se puede calentar de las siguientes maneras:

1. Manteniendo la almohadilla bajo el agua del grifo muy caliente hasta que cambie el color.
 2. Sujutando la almohadilla por la solapa, sumergiéndola en agua caliente hasta que el color cambie de naranja a amarillo.
- Revisar siempre la temperatura de la almohadilla antes de masajear los ojos, tocando con ella el interior de la muñeca. Si está demasiado caliente, esperar unos minutos y volver a intentarlo.
 - Si el color de la almohadilla calentable no es uniforme, agitarla antes de usar.
 - Comprobar que la almohadilla no esté dañada antes de volver a usarla.
 - Enjuagar con agua y colocarla de nuevo en el envase una vez seca.
 - Si la almohadilla calentable no vuelve al color original de forma natural, mantener en el frigorífico durante la noche.
 - Utilizar una nueva toallita para cada ojo. Lavar las manos antes y después del uso.
 - No enjuagar el ojo después de la aplicación.

Efectos adversos:

No se han detectado efectos secundarios asociados con el uso del producto.
En caso de cualquier efecto secundario, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones:

- Uso externo: sólo para aplicación sobre la zona periocular manteniendo el ojo cerrado.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes.
- En caso de sensación de quemazón persistente, debe suspenderse el tratamiento.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones para calentar la almohadilla y comprobar su temperatura.
- No reutilizar la toallita aplicada para evitar la contaminación e ineficacia del producto.
- Cada sobre está destinado a un solo uso, abrirlo justo antes de usarlo.
- No utilizar el producto en caso de que el sobre no esté sellado y / o el envase esté dañado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No perforar la almohadilla. No tragar el producto.
- Desechar la almohadilla una vez haya utilizado el último sobre.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Condiciones de conservación:

No utilizar ESTILA FORTE después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Conservar a temperatura ambiente y evitar el contacto con el agua.
La fecha de caducidad se refiere al producto en el envase sin dañar, almacenado adecuadamente.

Fecha revisión: Julio 2017

 **NTC Srl**
Via Luigi Ranza, 3
20124 Milán
Italia

Comercializado por:
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7 – 08034 Barcelona

AF-P/00



Producto sanitario


ANGELINI